

Modell: 951322 | **Marke:** Nordiwell

Produkt Klassifikation: FFP2 NR | **Produktgröße:** 160×105mm(±5mm) Anwendung

Es gilt zum Schutz vor Partikeln und nur zum Personenschutz.

Beachtung!

Diese Partikel-Atenschutzmaske wurde zum Schutz vor Partikeln entwickelt und hat die EN 149: 2001 + A1: 2009 bestanden, um die Konformität mit dem EHSR der Verordnung (EU) 2016/425 nachzuweisen.

Nicht wiederverwendbar:

Nicht wiederverwendbar bedeutet, dass die Partikel-Atenschutzmaske nur in einer Schicht verwendet werden kann.

Einstufung Anforderung (Maximum)		FFP1	FFP2	FFP3
Mindestens 46 der 50 einzelnen Übungsergebnisse für die gesamte Leckage nach innen dürfen nicht größer sein als		25%	11%	5%
Mindestens 8 der 10 arithmetischen Mittel des einzelnen Trägers für die gesamte nach innen gerichtete Leckage dürfen nicht größer sein als		22%	8%	2%
Maximale Durchdringung des Filtermaterials (Natriumchloridtest 95 l / min & Parafinöltest 95 l / min)		20%	6%	1%
Maximal zulässig Widerstand (mbar)	Einatmen (30 l / min)	0.6	0.7	1.0
	Einatmen (95 l / min)	2.1	2.4	3.0
	Ausatmen (160 l / min)	3.0	3.0	3.0

Warnungen und Einschränkungen

Stellen Sie immer sicher, dass das Produkt

- für den vorgesehenen Zweck geeignet ist.
- richtig aufgesetzt ist.
- während der gesamten Expositionszeit getragen wird.
- bei Bedarf ersetzt wird.

- Sitz der Atemschutzmaske (vor Gebrauch prüfen).
- Dieses Produkt ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt und sollte nicht länger als eine Schicht verwendet werden.
- Nicht mit Gesichtsbehaarung verwenden, die eine gute Abdichtung zwischen Gesicht und der Atemschutzmaske verhindern.
- Die Nichtbeachtung aller Anweisungen und Einschränkungen bei der Verwendung dieses Produkts kann die Wirksamkeit der Atemschutzmaske beeinträchtigen und zu Fehlfunktionen und Gesundheitsschäden führen.
- Die Atemschutzmaske ist für den beruflichen Gebrauch für Erwachsene konzipiert, die in seinem Gebrauch und seinen Einschränkungen entsprechend geschult sind. Die Atemschutzmaske ist nicht für Kinder bestimmt.
- Diese Atemschutzmaske liefert keinen Sauerstoff und darf nicht in Atmosphären mit weniger als 19,5% Sauerstoff verwendet werden.
- Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
- Nicht für Umgebungen geeignet, die unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährdend sind.
- Überschreiten Sie nicht die durch die gesetzlichen Standards festgelegten Höchstkonzentrationen.
- Teile nicht ersetzen, ändern, hinzufügen oder weglassen.

Bitte vor Gebrauch überprüfen

- Die Bänder sind gut befestigt.
- Die Atemschutzmaske hat das Haltbarkeitsdatum nicht überschritten: siehe Datum auf der Verpackung.
- Bitte benutzen Sie die Atemschutzmaske nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Bitte verwenden Sie die Atemschutzmaske nicht, wenn Schäden, Löcher, Schmutz oder Verunreinigungen am Atemschutzmaske festgestellt wurden.

Verwenden Sie die Anweisung

- Halten Sie die Kopfbänder in jeder Hand mit dem Nasenbügel nach oben.
- Positionieren Sie die Atemschutzmaske so auf dem Gesicht, dass Sie Ihre Nase, Mund und Kinn bedecken.
- Ziehen Sie jedes Band über das Ohr und stellen Sie die Bänder so bequem wie möglich ein.
- Passen Sie den Nasenclip so an, dass er sicher um die Nase angebracht ist und schmiegen Sie die Enden gegen die Wangen, um eine gute Dichtheit zu erzeugen.
- Halten Sie zur Prüfung der Dichtheit beide Hände vor die Maske und den Nasenclip fester an. Bei Luftaustritt an den Seiten, passen Sie die Kopfbänder an.

Wenn Sie keine ordnungsgemäße Abdichtung erreichen können, betreten Sie den kontaminierten Bereich NICHT.

Abnehmen der Atemschutzmaske

Legen Sie die Hand über das Atemschutzmaske, um die Position im Gesicht beizubehalten. Entfernen Sie die Bänder, die hinter Ihren Ohren ruhen.

Halten Sie die Atemschutzmaske in Position, ziehen Sie die hinter Ihren Ohren liegenden Bänder ab und entfernen Sie die Atemschutzmaske.

Abfallbehandlungsmethode

Entsorgen Sie den Abfall gemäß den regionalen Gesetzen und Vorgaben.

Lagerbedingungen und Haltbarkeit

Lagern Sie die Partikel-Atemschutzmaske vor dem Gebrauch in der Originalverpackung, fern von kontaminierten Bereichen, Staub, Sonnenlicht, extremen Temperaturen, übermäßiger Feuchtigkeit und schädlichen Chemikalien. Bei Lagerung in der Originalverpackung zwischen Temperaturen von -20 °C bis $+70\text{ °C}$ und einer relativen Luftfeuchtigkeit von höchstens 80% darf das Produkt bis zu dem auf der Verpackung neben dem Symbol „Verwendungsdatum“ angegebenen Datum verwendet werden. Die Haltbarkeit beträgt zwei Jahre.

	Gebrauchsanweisung beachten		Verwendbar bis
	Temperaturbegrenzung ($+2\text{ °C}$ - $+30\text{ °C}$)		Chargennummer
	Trocken aufbewahren		Nicht zur Wiederverwendung



Die Konformitätsbewertung der Verordnung (EU) 2016/425 von:

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A./Applus, Campus UAB, Apto Correos 18, 08193 BELLATERRA (Barcelona), Spanisch. Benannte Stelle Nr. 0370.

Konformitätserklärung finden Sie unter: www.combat-industries.com

Hersteller: Changzhou Kampfschutzausrüstung Co., Ltd.

Adresse: Qingsitang, Henglin, Changzhou, Jiangsu, 213101 China Tel: 0086-519-86818086

Email: info@combat-industries.com www.combat-industries.com

Made in China

